


## ResMed 带磁性夹的鼻罩和全脸面罩的替代产品对照表 <sup>1</sup>

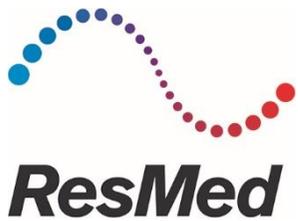

## ResMed 带磁性夹的鼻罩替代对照表<sup>1</sup>

以下 ResMed 鼻罩产品——AirFit™ N20、AirFit N10 和 AirFit N10 for Her——包含磁性夹。在更新了这些鼻罩的现有禁忌症和警告（请参阅我们发送给您的“现场安全通知”）后，本文档列出了现有 ResMed 产品组合中的多款替代产品，以帮助您在禁忌症患者提供没有磁性夹的鼻罩。

有关兼容性信息，请参阅产品的用户指南/临床指南或 [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks) 上的面罩/设备兼容性列表。


此信息旨在为您提供指导，以便更好地确定患者推荐的面罩替代品。为了确保最佳贴合，请进行试戴测试，并参阅相关的用户指南/临床指南以获取更详细的说明和注意事项。

	带磁性夹的鼻罩 1:	可替代的无磁性夹的鼻罩:
	AirFit™ N20	Mirage™ FX
		
压力范围	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O
尺寸转换*	AirFit N20 MED	Mirage FX Standard
	AirFit N20 LGE	Mirage FX Wide
面罩系统产品号	63529 - AIRFIT N20 -中号 (M) 63530 - AIRFIT N20 -大号 (L)	62105 - Mirage FX-标准号 62120 - Mirage FX-加宽号

注意: 不含磁性夹的鼻枕面罩包括 AirFit P10。不含磁性夹的全脸面罩包括 Mirage Quattro。请访问 [ResMed.com](http://ResMed.com) 以获取有关这些面罩的更多信息。

	带磁性夹的鼻罩 1:	可替代的无磁性夹的鼻罩:
	AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Mirage™ FX
		
压力范围	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O
尺寸转换*	AirFit N10 STD	Mirage FX Standard
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX Wide
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX Standard
面罩系统产品号	63224 - AirFit N10 : STANDARD 63226 - AirFit N10 -: WIDE 63225 - AirFit N10 for Her -:SMALL	62105 - Mirage FX -标准号 62120 - Mirage FX -加宽号

注意:不含磁性夹的鼻枕面罩包括 AirFit P10。不含磁性夹的全脸面罩包括 Mirage Quattro。请访问 ResMed.com 以获取有关这些面罩的更多信息。

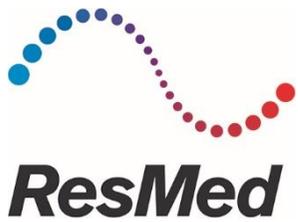

## ResMed 带磁性夹的全脸面罩替代对照表<sup>1</sup>


以下 ResMed 全脸面罩- AirFit™ F20-包含磁性夹。在更新了这些面罩的现有禁忌症和警告（请参阅我们发送给您的“现场安全通知”）后，本文档列出了现有 ResMed 产品组合中的多款替代产品，以帮助您在禁忌症患者提供没有磁性夹的面罩。

有关兼容性信息，请参阅产品用户指南/临床指南或 [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks) 上的面罩/设备兼容性列表。

此信息旨在为您提供指导，以便更好地确定患者推荐的面罩替代品。为了确保最佳贴合，请进行试戴测试，并参阅相关的用户指南/临床指南以获取更详细的说明和注意事项。

	带磁性夹的全脸面罩 <sup>1</sup> :	可替代的无磁性夹的全脸面罩:
	AirFit™ F20	Mirage Quattro™
		
压力范围	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
尺寸转换*	AirFit F20 SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	Mirage Quattro LGE
面罩系统产品号	63435 AIRFIT F20 --小号 (S) 63436 AIRFIT F20 --中号 (M) 63437 AIRFIT F20--大号 (L)	61216 - MIRAGE QUATTRO Full Face Mask-Extra Small (加小号) 61217 - MIRAGE QUATTRO Full Face Mask-Small (小号) 61218 - MIRAGE QUATTRO Full Face Mask-Medium (中号) 61219 - MIRAGE QUATTRO Full Face Mask-Large (大号)

注意: 不含磁性夹的鼻罩包括 Mirage™ FX, AirFit N20。不含磁性夹的鼻枕面罩包括 AirFit P10。请访问 [ResMed.com](https://www.ResMed.com) 以获取有关这些面罩的更多信息。

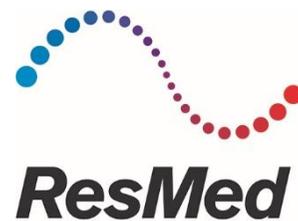

此内容仅供医疗专业人员参考。请查阅相关的临床指南和用户指南，了解在使用该产品之前和期间应考虑的任何警告和注意事项。

1. 面罩含有可能干扰某些植入物或医疗设备的磁铁。不适用于那些面罩使用者自身或使用面罩时与之密切接触的人拥有与磁铁相互作用的主动式医疗植入物和/或含有铁磁性材料的金属植入物的患者。请确保面罩磁铁与可能受磁干扰的植入物或医疗设备保持至少 6 英寸（150 毫米）的安全距离。有关完整信息，请参阅用户指南，包括磁铁的禁忌症和警告。

\*尺寸的供应可能因地区而异。

\*\* AirFit N10 和 AirFit N10 for Her 已从 ResMed 的产品系列中淘汰。然而，由于它们可能还存在于市场上，因此在这份文件中列出，以帮助仍然使用这些面罩的禁忌症患者

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift 是 ResMed 的商标。规格可能会发生变化，恕不另行通知。

© 2023 ResMed. 10113747/3 2023-10